

## Guía rápida para la programación

# Baha<sup>®</sup> Fitting Software 6

En esta guía rápida para la programación se ofrece una descripción general de programación del procesador de sonido Baha<sup>®</sup> 6 Max con Baha<sup>®</sup> Fitting Software 6.

### Seleccione el flujo de trabajo de programación

Se proporcionan varios flujos de trabajo para guiarle a través de diferentes casos de programación. La pantalla de selección de actividad aparecerá automáticamente antes de la conexión. Para continuar, se debe elegir una actividad.

### Programación:

**Primera programación** le guiará por todos los pasos necesarios para programar un procesador de sonido nuevo para un paciente.

**Programación de seguimiento** se utiliza para realizar ajustes en un procesador de sonido que ya haya sido programado durante una visita de seguimiento. Se le guiará por un flujo de programación simplificado y se le enviará directamente a la pantalla de ajuste.


**Actualizar el procesador de sonido** le guiará por todos los pasos necesarios para actualizar un paciente a un nuevo procesador de sonido Baha 6 Max. Se pueden leer los datos de una programación del procesador de sonido Baha 5 y aplicarlos.

**Unilateral a bilateral** se ha creado para actualizar un paciente con Baha<sup>®</sup> 6 Max unilateral a bilateral.

### Configuración:

**Crear archivo del paciente** le permite preparar un archivo del paciente y guardarlo antes de la sesión de programación.

**Restablecer los ajustes de fábrica** restablece la ganancia y las funciones a los ajustes de fábrica.

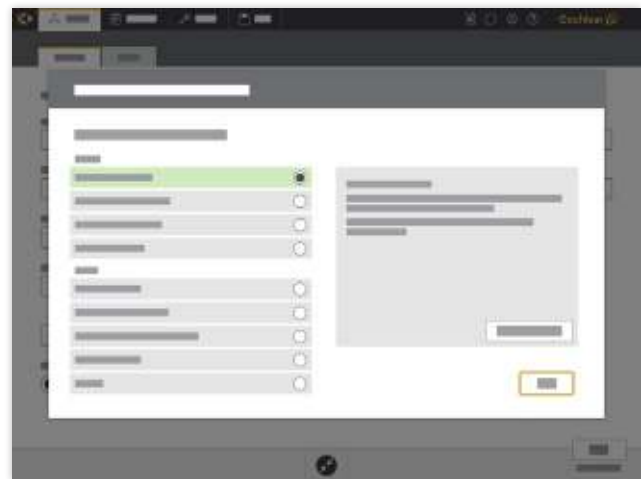

**Configurar procesador de sonido de repuesto** le guía por la configuración de un procesador de sonido de repuesto para un paciente.

**Configurar un procesador de sonido de demostración** le permite preparar e individualizar un procesador de sonido de demostración para un paciente usando el audiograma guardado.

**Ver archivo** le permite ver un archivo del paciente sin conectar un procesador de sonido.

Una vez seleccionado el flujo de trabajo de programación, puede proceder con la conexión del procesador de sonido. El flujo de la programación varía según la actividad elegida. Una vez conectado, puede desplazarse por los flujos de trabajo utilizando los botones "Siguiente" (B) y "Anterior" (A) del panel inferior.



## Guía rápida para la programación

# Baha<sup>®</sup> Fitting Software 6

### Prescribir

Para calcular la prescripción adecuada para el paciente, tiene que introducir los datos sobre la hipoacusia y el sistema de implante.

El **Audiograma** se puede introducir, incluidos los umbrales de conducción aérea estándar y de conducción ósea enmascarados y sin enmascarar.

**Seleccionar CO** es un paso de programación obligatorio; seleccione las opciones que mejor describan a su paciente. **CO Directa** le permite medir umbrales auditivos directamente a través del sistema Baha. Para aplicar la prescripción correcta, se requiere el audiograma o CO directa; para obtener los mejores resultados, disponer de ambos.



### Programación

En la pantalla Ajustes, puede hacer cambios generales al procesador de sonido y ver el efecto de la modificación en la gráfica de ganancia. Los ajustes de ganancia se pueden efectuar con la pestaña **Hearing mentor** o **Sintonización fina**. Es posible alternar entre las dos opciones. Se puede acceder al menú de ajuste de programa haciendo clic en el icono de programa situado en el centro de la pantalla.



## Guía rápida para la programación

# Baha<sup>®</sup> Fitting Software 6

### Configuración wireless

El procesador de sonido Baha<sup>®</sup> 6 Max permite el acceso a tecnología wireless de 2,4 GHz. Se pueden emparejar dispositivos inalámbricos en el software así como ajustar el sonido transmitido si se desea.



### Guardar

Cuando haya finalizado la programación y desee terminar una sesión activa, puede finalizar la programación guardando la sesión. La pantalla Guardar le permite revisar los ajustes.

La Guía para optimizar la programación estará disponible en esta pantalla para recordarle si se ha omitido alguno de los pasos recomendados durante la programación.



# Hear now. And always.

Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a ayudar a las personas con hipoacusia moderada a profunda para que disfruten de una vida llena de audición. Hemos proporcionado más de 600 000 dispositivos implantables que han ayudado a personas de todas las edades a escuchar y conectar con las oportunidades de la vida.

Nos proponemos ofrecer a la gente la mejor experiencia auditiva de por vida y el acceso a futuras tecnologías innovadoras. Colaboramos con las principales redes clínicas, de investigación y de apoyo.

Por ello, una amplia mayoría elige Cochlear por encima de cualquier otra empresa de implantes auditivos.

 **Cochlear Bone Anchored Solutions AB**, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel: +46 31 792 44 00, Fax: +46 31 792 46 95

## Regional Offices

**Cochlear Ltd**, (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia  
Tel: +61 2 9428 6555, Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Americas**, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA  
Tel: +1 303 790 9010, Fax: +1 303 792 9025

## Local Offices

**Cochlear Europe Ltd**, 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2HJ, United Kingdom  
Tel: +44 1932 26 3400, Fax: +44 1932 26 3426

**Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**, Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany  
Tel: +49 511 542 770, Fax: +49 511 542 7770

**Cochlear Benelux NV**, Schaliënhoedreef 20 I, 2800 Mechelen, Belgium  
Tel: +32 15 79 55 77, Fax: +32 15 79 55 70

**Cochlear France S.A.S.**, 135 route de Saint Simon, 31035 Toulouse, France  
Tel: +33 5 34 63 85 85 (international),  
Tel: 0805 200 016 (national), Fax: +33 5 34 63 85 80

**Cochlear Italia SRL**, Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy  
Tel: +39 051 601 53 11, Fax: +39 051 392 062

**Cochlear Tibbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Sti.**, Cubuklu Mah. Bogazici Cad. Bogazici Plaza, No: 6/1 Kavacik, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey  
Tel: +90 216 538 59 00, Fax: +90 216 538 59 19

**Cochlear Nordic AB**, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel: +46 31 335 14 61, Fax: +46 31 335 14 60

**Cochlear Canada Inc**, 2500-120 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada  
Tel: +1 416 972 5082, Fax: +1 416 972 5083

**Nihon Cochlear Co Ltd**, Ochanomizu-Motomachi Bldg 2-3-7 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan  
Tel: +81 3 3817 0241, Fax: +81 3 3817 0245

**Cochlear AG**, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland  
Tel: +41 61 205 8204, Fax: +41 61 205 8205

**Cochlear Latinoamerica**, S. A., International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama  
Tel: +507 830 6220, Fax: +507 830 6218

**Cochlear Limited (Singapore Branch)**, 238A Thomson Road #25-06, Novena Square Office Tower A, Singapore 307684, Singapore  
Phone: +65 65533814, Fax: +65 64514105

**Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd**, Unit 2608-2617, 26th Floor, No.9 Building, No.91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, PR China  
Tel: +86 10 5909 7800, Fax: +86 10 5909 7900

**Cochlear (HK) Ltd**, Room 1404-1406, 14/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong  
Tel: +852 2530 5773, Fax: +852 2530 5183

**Cochlear Korea Ltd**, 1st floor, Cheongwon Building 33, Teheran-ro 8 gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea  
Tel: +82 2 533 4450, Fax: +82 2 533 8408

**Cochlear Medical Device Company India PVT Ltd**, Platina Bldg, Ground Floor, Plot No. C 59, G Block, BKC, Bandra East, Mumbai 400051 India  
Tel: +91 22 6112 1111, Fax: +91 22 61121100

**Cochlear Colombia**, Avenida Carrera 9 #115-06 Of. 1201 Edificio Tierra Firme, Bogota D.C., Colombia  
Tel: +57 315 339 7169 / +57 315 332 5483

**Cochlear México**, S.S.A. de C.V, Av. Tamaulipas 150 Torre A piso 9, Col. Hipódromo Condesa, 06170 Cuauhtémoc, Ciudad de México, México  
Tel: +52 0155 5256 2199

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

El contenido de estas directrices tiene únicamente carácter informativo y no sustituye ni elimina las opiniones clínicas ni la atención y obligaciones profesionales necesarias para cada paciente determinado. La información se ha preparado haciendo referencia a la mejor información disponible en el momento de la preparación. Sin embargo, no se asegura que la información sea exhaustiva ni precisa en todos los aspectos. La atención clínica que se lleve a cabo de acuerdo con estas directrices se debe prestar en el contexto de los recursos y conocimientos técnicos disponibles localmente. En estas directrices no se abordan todos los elementos de la norma habitual y se acepta que los médicos son responsables de:

- informar a los pacientes de su elección y de asegurarse de que se obtiene el consentimiento informado antes de prestar la atención sanitaria
- prestar la atención dentro de las normas habituales en el ejercicio de la profesión, cumplir todos los requisitos reglamentarios y mantener unos estándares adecuados de conducta profesional
- aplicar las precauciones habituales y complementarias según sea necesario a la hora de prestar la atención sanitaria
- documentar toda la atención prestada de acuerdo con los requisitos locales y obligatorios

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, SmartSound, el logotipo elíptico y las marcas que llevan un símbolo ® o ™ son marcas comerciales o registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB o Cochlear Limited (a menos que se indique algo distinto).

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2021. Todos los derechos reservados. 2021-03.

D1826319-V1 Spanish translation of D1762839-V1